



# ZedHTO

## CT撮像、再構成条件

### 患部

Knee

### 管電圧

標準管電圧(120kVp目安)

### データ形式

DICOM形式

### スライス画像

Axial方向のスライス画像で同シリーズ

### スライス厚

2 mm以下を推奨  
※オーバーラップなし

### 再構成スライス間隔

2 mmまたはそれ以下を推奨  
※2mmで再構成不可の場合はそれに近い間隔で再構成

### FOV

患側骨全体が入る値で設定

### Gantry Tilt

0度

### データ保存 (CDまたはDVDの場合)

- Axial画像のみDICOM形式で保存
- 1ディスクに1シリーズのみ同じフォルダにまとめて保存
- 専用Viewerやスカウト不要
- Coronal,Sagittal画像は不要

### 再構成条件：軟部条件推奨

GE : STANDARD


Canon : FC01 , FC03 , FC04 , FC10 , FC15

Philips : B

SIEMEND : B30s , B41s

### 撮影範囲

大腿骨頭～足関節面まで

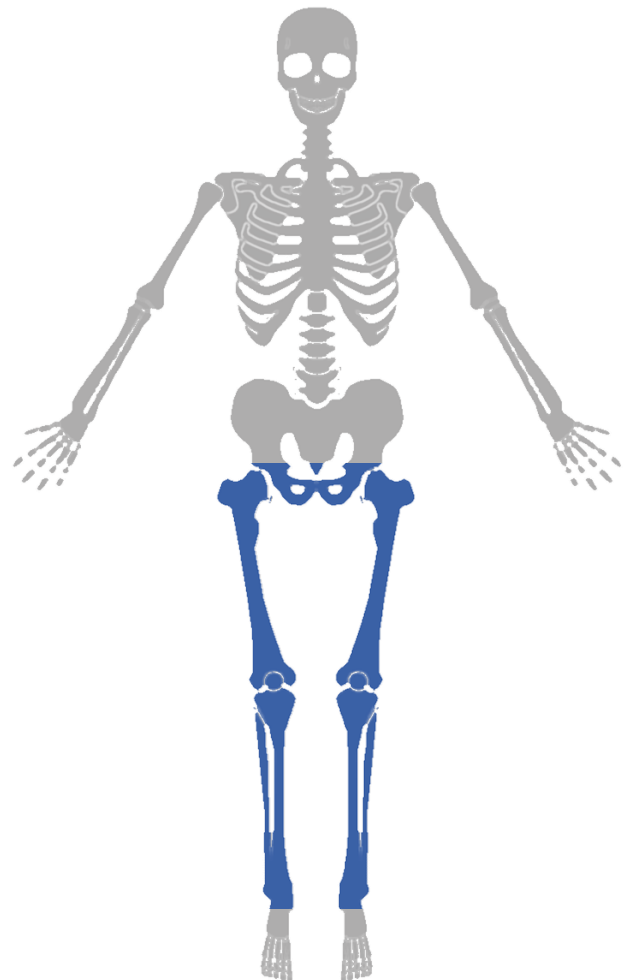

※患側片側だけでもプランニング可能です